

平成 29 年 8 月 1 日

家庭用ローラー式電気マッサージ器の使用中止のお願い

株式会社 的場電機製作所

弊社が平成 2 年に製造いたしました、家庭用ローラー式電気マッサージ器「シェイプアップローラーⅡ」を、布カバーを外した誤った使い方により、衣服が巻き込まれ窒息死する事故が発生いたしました。

亡くなられた方とご遺族の皆様に対しまして心より深くお悔やみを申し上げます。

弊社としては、社告やホームページ等を通じて、全国のご愛用者の皆様に、誤った使い方をすると死亡や重傷を負う可能性がありますので、改めて使用を中止して弊社までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

このマッサージ器は過去にも同様な事故が発生しており、平成 20 年 12 月と平成 24 年 5 月に、厚生労働省の記者クラブで記者会見を行い、報道関係の皆様のお力をお借りして「カバーを外したり、破れた状態で絶対に使用しないで下さい」との「注意喚起」を広く行い、また業界団体の(一社)日本ホームヘルス機器協会様にも「注意喚起」等のご協力をお願いして参りました。

しかし、平成 26 年 5 月にはそうした声も届かず、同様な死亡事故が起きてしまいました。弊社では、対象機種については今後の使用を中止して頂くようご案内して参りました。

この間、テレビや新聞でも健康機の誤使用による危険性を扱った特集等も報道して頂きました。

対象製品は製造終了より 20 年以上経過し、販売会社も既にないことでご使用者様を特定することは困難であります。今後はさらに広く多くの方に知って頂くため、報道関係の方々にお力をお借りするとともに、全国都道府県、市区町村様の広報活動や地域コミュニティの場での掲示等をお願いして参りたいと思います。重ねてお客様には該当製品にたいする「使用中止」のお願いと、より安全にご使用できる現行製品へお取替え頂くようお願い申し上げます。

記

1) 対象商品名

(商 品 名)	(型 式)
① アルビシェイプアップローラー	
② シェイプアップローラーⅡ	SR-5118

2) 発生事故の概要

- ・平成 29 年 7 月 26 日 北海道斜里町で 70 代の女性死亡
- ・事故発生商品：シェイプアップローラーⅡ（平成 2 年製造）
- ・事故原因：カバーのない状態で使用したため衣服を巻き込み窒息したことにより死亡

3) 過去の死亡事故

- ・平成 11 年 栃木県で 40 代の女性
 - ・平成 15 年 香川県で 60 代の女性
 - ・平成 20 年 北海道で 50 代の女性
 - ・平成 24 年 愛知県で 60 代の女性
 - ・平成 26 年 山梨県で 70 代の女性
- 事故発生商品は「アルビシェイプアップローラー」
事故原因は前項と同じ

4) お客様にお願いしたい事項

使用を中止して、弊社までご連絡ください。

5) 販売期間、販売台数

- | | | |
|------------------|---------------------|----------|
| ① アルビシェイプアップローラー | 昭和 58 年 8 月から平成 2 年 | 約 4 2 万台 |
| ② シェイプアップローラー II | 昭和 63 年 7 月から平成 8 年 | 約 3 6 万台 |

6) 販売場所

全国の百貨店、スーパー等の催事場での販売

7) 商品の特定方法

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ①アルビシェイプアップローラー | 商品本体側面に商品名を記載したラベルを貼付 |
| ②シェイプアップローラー II | 商品本体裏面に商品名を記載したラベルを貼付 |

8) 安全装置（過負荷保護装置）

- ①、② ともになし

9) 使用中止の通知方法

- ①新聞に社告を掲載して全国に使用中止の案内をいたします。
- ②弊社のホームページに使用中止のお知らせを掲載します。
- ③全国都道府県、並びに市区町村に広報やコミュニティ施設での案内、掲示等の依頼を予定しています。

10) 現在製造中の類似機種

- ①ロースーマルチリフレクサー
- ②プチローラー
- ③コンフォートウィン、コンフォートトップ、コンフォートローラ
- ④コンフォートウィン・リバーズ

現在製造中の全ての機種に安全装置が付いております。

添付資料

対象商品の確認箇所

<連絡先>

株式会社 的場電機製作所 (マトバデンキセイサクショ)

住 所 〒350-1101 埼玉県川越市的場 2627 番地 5



フリーダイヤル 0120-01-2251

電 話 番 号 049-231-2255(代)

(受付時間) 平日 9 時から 17 時まで (土日・祝日を除く)

販売名確認箇所

① アルビシェイプアップローラー

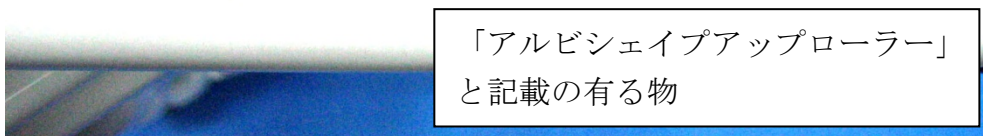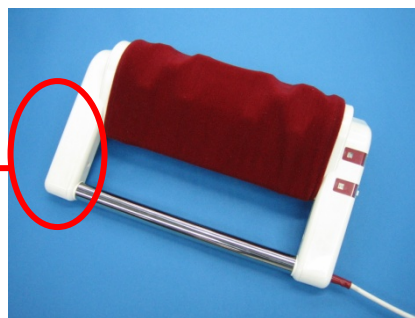

② シェイプアップローラーⅡ



裏側

